


TUBO NIBP ADULTO

3m - Monitor MP

ACCESORIOS PARA EQUIPO DE MONITOREO



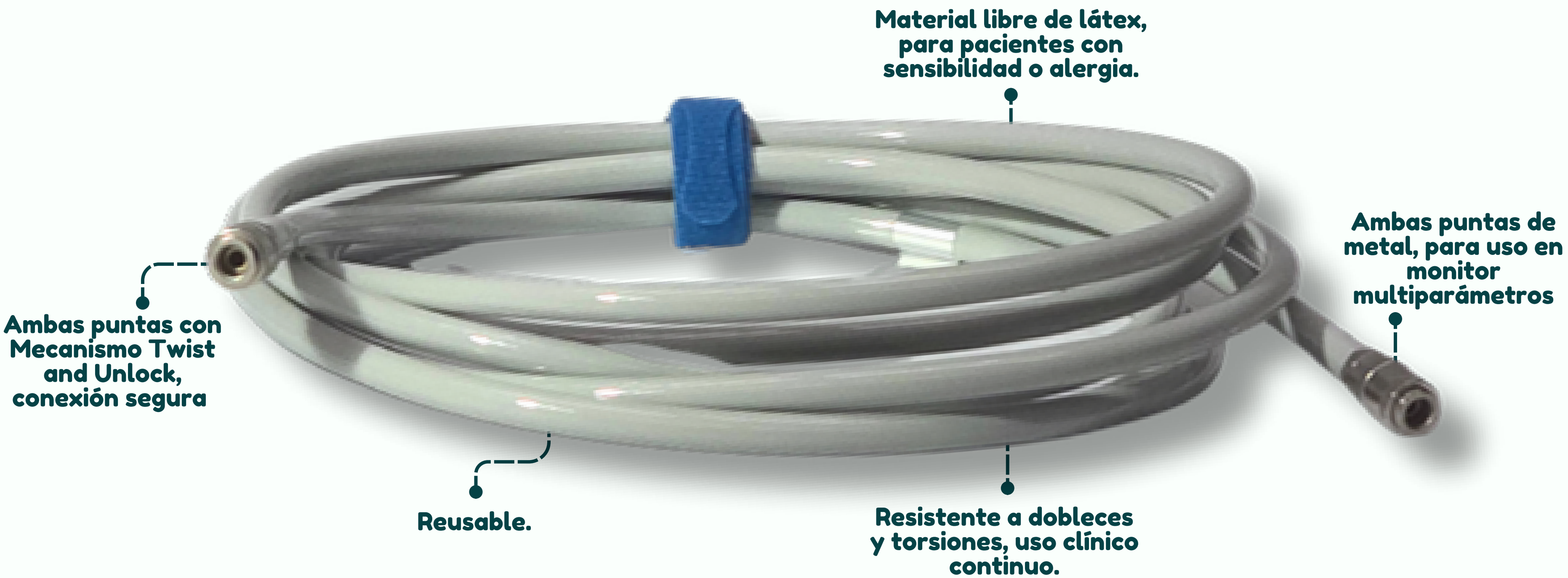

**Material libre de látex,
para pacientes con
sensibilidad o alergia.**

**Ambas puntas con
Mecanismo Twist
and Unlock,
conexión segura**

**Ambas puntas de
metal, para uso en
monitor
multiparámetros**

Reusable.

**Resistente a dobleces
y torsiones, uso clínico
continuo.**

¿QUÉ HACER?

- **Uso en monitores: PM-2000XL, PM-2000XL+ y PM-2000TM.**
- **Renovar cada 3 años de uso.**
- **Enrollar en forma de círculo**
- **Manipular con cuidado.**
- **Mantener libre de polvo y suciedad.**
- **Guardar en lugar seco y ventilado (15-35°C).**
- **Verificar que no haya daños visibles.**

LIMPIEZA

- 1 Paño humedo + detergente aprobado.**
 - **Detergente suave casi neutro**
 - **Alcohol etílico (75%)**
 - **Alcohol isopropílico (70%)**
- 2 Pasar paño limpio húmedo con agua para quitar residuos.**
- 3 Secar con paño suave.**

Limpiar después de cada uso o limpieza diaria si no se usa.

Contáctanos

www.deltamedic.com/

Bld. Héroes del 5 de Mayo No.115

Col. Gabriel Pastor 2da Sección.

C.P. 72425

Puebla, Pue.

(222) 240 - 9980

(222) 211 - 6113

(222) 240 - 2687

ventas@deltamedic.com

