


TUBO NIBP NEONATO

3m

ACCESORIOS PARA EQUIPO DE MONITOREO



Medición de presión arterial no invasiva neonatal de 3 metros.

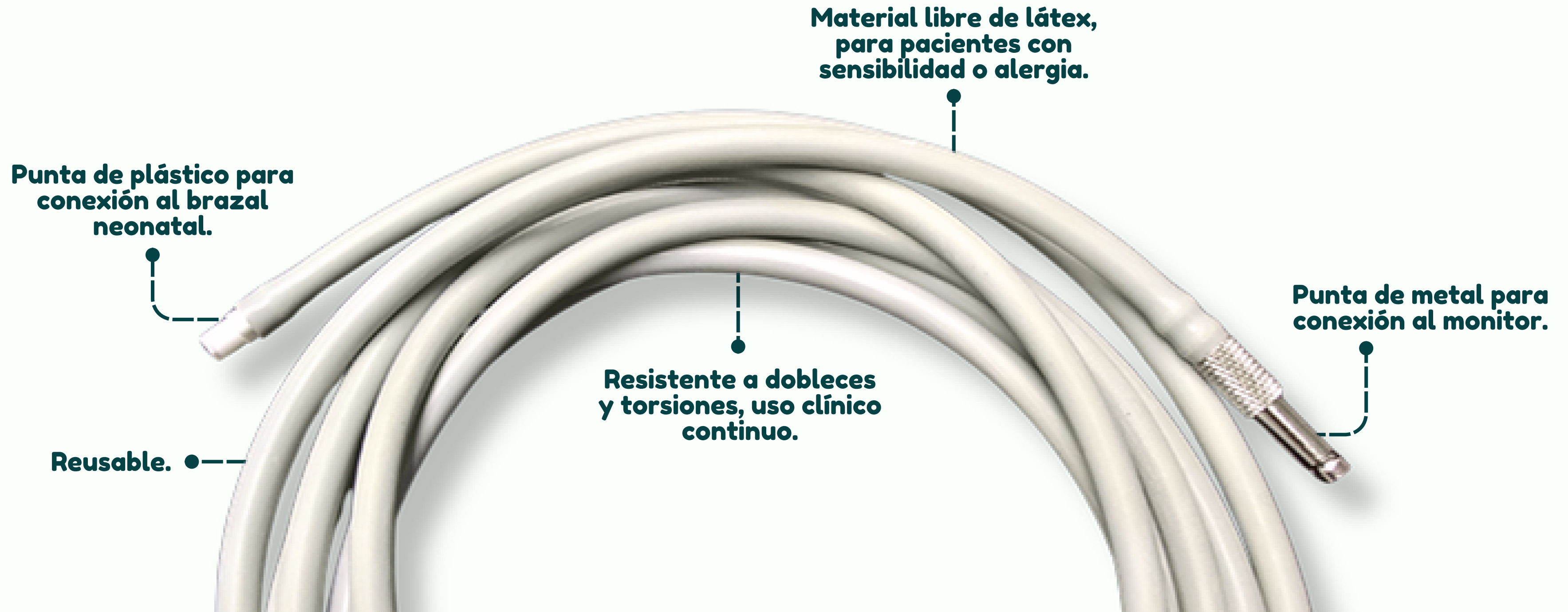

¿QUÉ HACER?

- **Uso en módulos: Que incluyan NIBP (XM1, XM2, etc.)**
- **Uso en monitores: PM-2000M.**
- **Renovar cada 3 años de uso.**
- **Enrrollar en forma de círculo**
- **Manipular con cuidado.**
- **Mantener libre de polvo y suciedad.**
- **Guardar en lugar seco y ventilado (15-35°C).**
- **Verificar que no haya daños visibles.**

LIMPIEZA

- 1 Paño humedo + detergente aprobado.**
 - **Detergente suave casi neutro**
 - **Alcohol etílico (75%)**
 - **Alcohol isopropílico (70%)**
- 2 Pasar paño limpio húmedo con agua para quitar residuos.**
- 3 Secar con paño suave.**

Limpiar después de cada uso o limpieza diaria si no se usa.

Contáctanos

www.deltamedic.com/

Bld. Héroes del 5 de Mayo No.115

Col. Gabriel Pastor 2da Sección.

C.P. 72425

Puebla, Pue.

(222) 240 - 9980

(222) 211 - 6113

(222) 240 - 2687

ventas@deltamedic.com

